


はじめにお読みください

血液検査サービス取り扱い説明書

1 検査申し込み用紙・問診票を記入

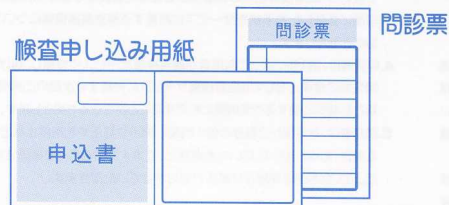

検査申し込み用紙右側の記入方法をよく読み、記入漏れがないか確認してください。複写式になっていますので、2枚目は検査結果が届くまで大切に保管してください。問診票がある場合は必ずご記入ください。

2 採血処置済みボトルと、使用済み器具を元のトレイに入れる




ボトルと器具を入れたトレイは、中身が出ないようにしっかりと閉めてください。使用済み器具は、医療ゴミとして責任を持って処理します。

3 梱包



返送用封筒に
 検査申し込み用紙
 問診票(ある場合のみ)
 ボトル入りトレイ
 を入れます。
 ※封筒の表面に住所、氏名を忘れずにご記入ください。

4 返送

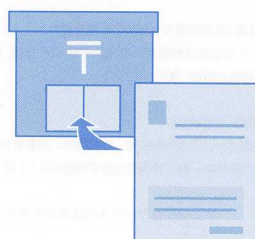

郵便局の窓口、または屋内に設置してあるポスト(コンビニ等)から返送してください。
 ※屋外のポストからの返送は、なるべくお避けください。
 検査センターは、土・日・祝日も受け付けています。